

PRODUCER:

FOSHAN HONGFENG co., ltd

Add: No.4-2 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100 Guangdong, China

EC REP: MedNet GmbH, Borkstrasse 10, 48163 Munster, Germany

PŘÍRUČKA A POKYNY K ÚDRŽBĚ**ANTIDEKUBITNÍ TLAKOVÁ PUMPA SY-B1 CODE RA7573298 A BUBLINOVÁ MATRACE MB-200 CODE RA7573202****POKYNY K UŽÍVÁNÍ:**

Vážený zákazníku, produkt, který se chystáte použít, je zdravotní pomůcka. Tlakové čerpadlo střídá tlak v bublinách matrace a tím pomáhá prevenci prvního stupně proleženin. Pomůcka je vhodná pro dlouhodobou léčbu a pro domácí použití. Přístroj snižuje tlak na pokožku a pomocí jemné masáže zlepšuje průtok krve a zlepšuje okysličení tkání.

**PŘED POUŽITÍM**

1. Při otevření balení zkontrolujte neporušenost zařízení. Věnujte zvláštní pozornost přítomnosti poškození plastových částí, které mohou zpřístupnit dotyk možných živých částí zařízení. V těchto případech nepoužívejte přístroj.
2. Před připojením spotřebiče vždy zkontrolujte, zda elektrické údaje uvedené na typovém štítku a typ použitého konektoru odpovídá parametrům elektrické sítě, do které má být připojen.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. V případě poruchy se prosím okamžitě obraťte na prodejce.
5. Výrobce není odpovědný za nesprávné použití.
6. Tato zdravotní pomůcka je určena výhradně pro použití, pro které byla navržena. Výrobci nemůže být přičítána odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v případě, že je některá část zařízení nebo jeho součástí poškozená, viditelně porušená, po náhlém pádu nebo zasažení vodou. Nedodržování těchto pravidel může ohrozit bezpečnost zařízení. Pro jakékoli doplňující informace se obraťte na výrobce.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Aby nedošlo k požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti anestetických plynů, hořlavých materiálů nebo v přítomnosti kapaliny, která by mohla vniknout do zařízení.

**SYMBOLY**

	Postupujte podle pokynů
	Návod obsahuje užitečné rady k použití
	Obecná poznámka
	ON (Zapnuto)
O	OFF (Vypnuto)
	Zařízení typu BF dle normy IEC 60601-1
	Rozsah průtoku vzduchu
	Nakládání s odpady v souladu se směrnicí. 2002/96/CE včetně budoucích aktualizací
	Dvojitá izolace



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte čerpadlo vodorovně nebo jej zavěste u nohou postele za specifická ramínka zesponu přístroje.
2. Nafukovací bublinovou matraci umístěte vždy na tradiční matraci postele a věnujte zvýšenou pozornost, aby hadice nebyly zkroucené nebo zlomené. Přecházející konce matrace založte pod tradiční matraci.
3. Připojte tlakovou pumpu a stiskněte ON. Otočný knoflík pro nastavení průtoku vzduchu otočte do maximální polohy. Po 20 minutách by měly být matrace připraveny.
4. Vždy používejte prostěradlo nebo potah mezi bublinami nafukovací matrace a pacientem.
5. Knoflík pro regulaci tlaku na tlakové pumpě upravte podle hmotnosti pacienta, aby dosáhl co největšího pohodlí.



ROZSAH PRŮTOKU VZDUCHU

HMOTNOST	POLOHA KNOFLÍKU PRO REGULACI TLAKU
50KG	POZICE 40-60
50KG-65KG	POZICE 60-80
65KG-85KG	POZICE 80-100
85KG-110KG	POZICE 120



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pressure Pump SY-B1	MB-200
Výrobce: FOSHAN HONGFENG CO., LTD	Výrobce: FOSHAN HONGFENG CO., LTD
Kód produktu: RA7573298	Kód produktu: RA7573202
Název: Tlaková pumpa pro antidekubitní bublinovou matraci	Název: Antidekubitní bublinová matrace
Napájecí napětí: 230V~ -50Hz	Rozměry: cm 200x88x6.5H + 90cm borders
Průtok vzduchu: 5 liter/min	Počet buněk: 130 bublin
Rozsah tlaku: 40 mmHg ÷ 120 mmHg	Materiál: PVC podle CE
Doba cyklu: 10 min	PVC tloušťka: 30 micron
Spotřeba elektrické energie: 7W	Barva: béžová
Třída bezpečnosti: class II	Hmotnost: cca 2,0 kg
Krytí: pojistka F1A	Opravná sada je součástí
Rozměry: 245(L)mm x 112 (W)mm x 80(H)mm	Pumpa je propojena speciální hadicí
Obal: ABS	Zatížení: pro pacienty od 30kg do 110kg
Hmotnost: cca 1,4kg	Vyrobeno: China
Vyrobeno: China	

Pracovní podmínky

Pokojová teplota: 10°C ÷ 35°C

Vlhkost: 20 ÷ 80% RH

Skladovací a přepravní podmínky

Pokojová teplota: -15°C ÷ 50°C

Vlhkost: 10 ÷ 90% RH



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení nevyžaduje údržbu.

K čištění matrace použijte neutrální čisticí prostředek, vlhký hadřík nebo dezinfekční prostředek. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit matraci.

K čištění tlakové pumpy nepoužívejte příliš vlhký hadřík. Nepoužívejte také žádné druhy mycích prostředků.

VAROVÁNÍ: Všechna čištění a údržbové operace provádějte po odpojení kompresoru od elektrické sítě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje	Zkontrolujte připojení k elektrické síti, případně zda je v pořádku pojistka.
Matraci nelze nafouknout	Zkontrolujte zda jsou hadice korektně propojeny a že není v cestě vzduchu žádná překážka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Produkt má záruku po dobu 1 let, platnou od data zakoupení. Během záruční doby poskytuje prodejce opravu nebo výměnu jakýchkoli vadných součástí zdarma. Veškeré opravy v průběhu záruční doby nemají vliv na délku záruční doby. Za všechny vady, mimo výrobních, zodpovídá koncový uživatel a to i v případě dílů podléhajících opotřebení. Výlohy spojené s opravou nebo výměnou produktu, hradí zákazník. Záruka nebude poskytnuta v případě zjištění neodborné manipulace, úprav zařízení nebo vady způsobené nedbalostí nebo nesprávným užíváním. Záruka zaniká, pokud bylo registrační číslo výrobku odstraněno, poškozeno nebo změněno.